



Enterobacteriaceae - Enterobakterier

Nr.: 1.2.

Bilag: Tabel 1 og 2

Dato: Maj 1999

Minimumskriterier:

Vokser i atmosfærisk luft med typiske kolonier på blå plade eller McConkey plade

Antibiotika resistensmønster foreneligt med taxon

Fakultativt anaerobe, oxidase negative

Diagnostiske tests:

Gram-negative peritrikt bevægelige eller ubevægelige stave

Vokser i atmosfærisk luft med typiske kolonier på blå plade/McConkey plade

Antibiotika resistensmønster foreneligt med taxon

Fakultativt anaerobe

Oxidase negative

Fermenterer mange kulhydrater i almindelige forgæringsmedier

Yderligere identifikation kan udføres i henhold til tabeller 1 og 2:

- Isolater fra bloddyrkninger og andre udvalgte prøve kategorier identificeres i henhold til tabel 2
- Andre isolater i henhold til tabel 1.
- Se dog særlige skemaer for *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae* og *Klebsiella oxytoca* samt *Proteus mirabilis* og *Proteus vulgaris*.

Supplerende undersøgelser:

På en række af arterne (*E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Y. enterocolitica*) kan serologisk typeinddeling på basis af bakteriernes O, evt. H eller K, antigen udføres

Bemærkninger: