



Klebsiella pneumoniae

Nr.: 1.2.2.

Bilag: Tabel 1 og 2

Dato: Maj 1999

Minimumskriterier:

Vokser i atmosfærisk luft med typiske, fede kolonier på blå plade eller McConkey plade

Antibiotika resistensmønster foreneligt med art, ampicillin resistent

Lactose positiv (blå /McConkey plade); ubevægelig; indol negativ, VP positiv; lysin positiv; ornithin negativ

Diagnostiske tests:

Gram-negative ubevæglige stave

Fakultativt anaerobe

Vokser i atmosfærisk luft med typiske, fede kolonier på blå/McConkey plade, oftest lactose positiv

Antibiotika resistensmønster foreneligt med art, ampicillin resistent

Ubevægelig

Indol negativ

VP (30° C) positiv

Lysin positiv

Ornithin negativ

Yderligere identifikation udføres i henhold til skemaer 1 og 2

Supplerende undersøgelser:

Serologiske typeinddeling på basis af bakteriernes K og O antigen

Andre typningsmetoder kan eventuelt udføres

Bemærkninger:

VP ofte negativ ved 35° C