



***Klebsiella oxytoca***

Nr.: 1.2.3.

Bilag: Tabel 1 og 2

Dato: Maj 1999

Minimumskriterier:

**Vokser i atmosfærisk luft med typiske, fede kolonier på blå plade eller McConkey plade**

**Antibiotika resistensmønster foreneligt med art, ampicillin resistent**

**Lactose positiv (blå/McConkey plade); ubevægelig; indol positiv, VP positiv; lysin positiv; ornithin negativ**

Diagnostiske tests:

Gram-negative ubevæglige stave

Fakultativt anaerobe

**Vokser i atmosfærisk luft med typiske, fede kolonier på blå/McConkey plade, oftest lactose positiv**

**Antibiotika resistensmønster foreneligt med art, ampicillin resistent**

**Ubevægelig**

**Indol positiv**

**VP (30° C) positiv**

**Lysin positiv**

**Ornithin negativ**

Yderligere identifikation udføres i henhold til skemaer 1 og 2

Supplerende undersøgelser:

Serologiske typeinddeling på basis af bakteriernes K og O antigen

Andre typningsmetoder kan eventuelt udføres

Bemærkninger:

VP ofte negativ ved 35° C