



***Streptococcus pneumoniae*,
pneumokokker**

Nr.: 3.2.1.

Bilag:

Dato: Maj 1999

Minimumskriterier:

Vokser i atmosfærisk luft med typiske kolonier med α -hæmolyse

Antibiotika resistensmønster foreneligt med art

Optokin følsom eller kapselvulst med OMNI serum

Diagnostiske tests:

Gram-positive lancetformede diplokokker

Vokser i atmosfærisk luft med typiske kolonier

Antibiotika resistensmønster foreneligt med art

Kapselvulst med OMNI serum

Latex kit positiv

Galdeopløselighed (plade/opslemning)

Optokin følsom
(disk/tablet)

Katalase negativ

Supplerende undersøgelser:

Serotypebestemmelse

Bemærkninger:

Ru (akapsulate) stammer uden kapselvulst med OMNI serum forekommer

CO₂ reducerer hæmningszonen om optokin disk/tablet